



Mosaic P 6C, Mosaic M 6C, Mosaic M NR 6C


Lietotāja rokasgrāmata

Komponenti un nosaukumi

Šajās lietošanas instrukcijās ir aprakstīti vairāku veidu dzirdes aparāti. Skatiet tālāk norādītos attēlus, lai noteiktu, kura veida dzirdes aparātu jūs izmantojat.

Jūsu dzirdes aparāti ir vai nu piestiprināti aizauss stiprinājumam un pielāgotam ausu ieliktnim, vai standarta caurulītei (ThinTube) un standarta ausu ieliktnim (LifeTip).

Mosaic M, Mosaic M NR

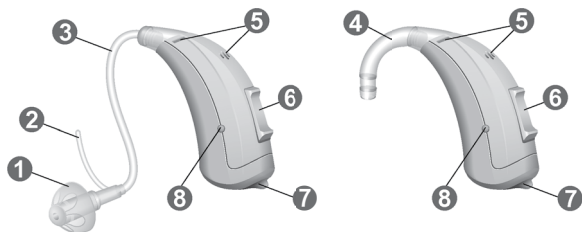

-
- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Auss ieliktnis (LifeTip) | 6 Taustiņslēdzis (vadības elements) |
| 2 Aiztures stieple (izvēles) | 7 Baterijas nodalījums (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis) |
| 3 Caurulīte (ThinTube) | 8 Uzlādes kontakti (tikai Mosaic M) |
| 4 Aizauss stiprinājums | |
| 5 Mikrofona atveres | |
-

Baterijas

Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, skaņa kļūs vājāka vai tiks atskaņots brīdinājuma signāls. No baterijas veida ir atkarīgs, pēc cik ilga laika baterija ir jānomaina vai jāuzlādē.

Baterijas izmērs un padomi par tās izmantošanu

Ieteikumus par piemērotajām baterijām lūdziet savam dzirdes aprūpes speciālistam.

Baterijas izmērs:	13
-------------------	----

- Dzirdes aparātos jāizmanto pareizā izmēra baterijas.
- Ja plānojat dzirdes aparātus neizmantot vairākas dienas, izņemiet baterijas.
- Vienmēr nēsājiet līdzī rezerves baterijas.
- Tukšas baterijas nekavējoties izņemiet un, lai veiktu to galējo utilizāciju, ievērojiet vietējos otrreizējā pārstrādes noteikumus.

Bateriju nomaiņa

Baterijas izņemšana

- ▶ Atveriet bateriju nodaļījumu.



- ▶ Lai bateriju izņemtu, izmantojiet magnētu. Magnēts ir pieejams kā piederums.



Baterijas ievietošana

- ▶ Ja baterijai ir aizsargpārklājums, noņemiet to, kad baterija ir jāizmanto.



- ▶ Ievietojiet bateriju, simbolu "+" vēršot uz augšu (skatīt attēlu).



- ▶ Rūpīgi aizveriet bateriju nodaļījumu. Ja sajūtat pretestību, baterija nav ievietota pareizi.

Nemēģiniet aizvērt bateriju nodaļījumu ar spēku. Tādējādi tas var tikt bojāts.

Ikdienas lietošana

Ieslēgšana un izslēgšana

Ir pieejamas tālāk minētās dzirdes aparātu ieslēgšanas vai izslēgšanas iespējas.

Izmantojot baterijas nodalījumu

- ▶ Ieslēgšana. Aizveriet bateriju nodalījumu.
Tiks iestatīts **noklusējuma** skaļuma līmenis un dzirdes programma.
- ▶ Izslēgšana. Atveriet bateriju nodalījumu līdz pirmajam aizturim.

Izmantojot taustiņslēdzi

- ▶ Ieslēgšana vai izslēgšana. Nospiediet taustiņslēdzi un turiet to nospiestu vairākas sekundes. Lai iegūtu informāciju par taustiņslēdža iestatījumiem, skatiet sadaļu "Vadības elementi".
Pēc ieslēgšanas saglabājas **iepriekš** izmantotā skaļuma līmeņa un dzirdes programmas iestatījums.